

Šiose naudojimo instrukcijose pateikta svarbi informacija.  
Įdėmiai perskaitykite ir saugokite, nes gali prireikti ateityje.

## PROGENT

BALTYMŲ VALIKLIS  
IR DEZINFEKAVIMO TIRPALAS  
standiesiems dujoms laidies kontaktiniams lęšiams.

### Stiprus valymo skystis

#### INDIKACIJOS

Baltymų valiklis ir dezinfekavimo tirpalas standiesiems dujoms laidies kontaktiniams lęšiams

#### NURODYMAI

- 1 Įdėkite kontaktinius lęšius į „Progent Vial“ buteliuko dangtelį taip, kad jie būtų tinkamame dešiniajame arba kairiajame laikiklyje: R = dešinė, L = kairė, norint intensyviai valyti.
- 2 Atsargiai atidarykite dozės pakuotę nepaliesdami angos ir saugodami, kad neprisiliestų prie drabužių.
- 3 Į „Progent Vial“ buteliuką įpilkite A tirpalo, o tada B tirpalo.
- 4 Sandariai uždarykite „Progent Vial“ buteliuko dangtelį ir švelniai pakratykite kelis kartus.
- 5 Pamerkite lęšius į „Progent“ ne daugiau kaip 30 minučių.
- 6 Nuimkite „Progent Vial“ dangtelį ir ištuštinkite buteliuką. Kruopščiai nuskalaukite laikiklyje esančius lęšius naudodami įprastą skalavimo tirpalą („MeniCare Plus“).
- 7 Tada kruopščiai nuvalykite lęšius įprastu tirpalu ir juos nuskalaukite. Po to lęšius galima nešioti arba laikyti laikymo dėkle.
- 8 Kruopščiai išskalaukite „Progent Vial“ buteliuką ir jo dangtelį skalavimo ir įprastu tirpalu ir leiskite jiems išdžiūti.

#### ĮSPĖJIMAI

Nenaudokite „Progent“ akims, nosiai arba burnai. Jeigu panaudojote netinkamai, nedelsdami skalaukite vandeniu ir pasitarkite su savo akių priežiūros specialistu.

- Po mirkymo „Progent“ tirpale labai svarbu gausiai nuskalauti lęšius skalavimo ir įprastu tirpalu.
- LAIKYKITE VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

#### ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nelaikykite į „Progent“ pamerktų lęšių ilgiau nei 30 minučių. Lęšiai gali prarasti spalvą. Tačiau tai neturės įtakos jų kokybei.
- **Svarbu: neprarykite.**
- Skirta naudoti savaitei kiekvieną dieną (ir išsiėmus ilgesnio nešiojimo lęšius)
- Nenaudokite „Progent“ A ir B tirpalo atskirai.
- Vienkartinės dozės pakuotės. Kiekvieną kartą panaudoję, išmeskite tirpalą ir dozės pakuotes.
- Laikykite kambario temperatūroje (15–25 °C).
- Saugokitės, kad nepatektų ant odos ir neišliškite „Progent“ ant drabužių. „Progent“ gali juos išbalinti.
- Nenaudokite „Progent“ A ir B tirpalo pasibaigus galiojimo laikui, atspausdintam ant vienkartinės dozės pakuotės.
- Laikydami saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

#### KONTRAIKACIJOS

- Nenaudokite minkštiesiems lęšiams.
- Nenaudokite, jeigu pasireiškė alergijos simptomų vienai iš sudedamųjų medžiagų.

#### NEPAGEIDAUJAMOS REAKCIJOS

Jei patiriate nuolatinį nepatogumą ar suerzinimą, išimkite lęšius, liaukitės naudoti gaminį ir pasitarkite su akių priežiūros specialistu.

#### KONTAKTINIŲ LĘŠIŲ DEZINFEKAVIMAS

Mirkant vos 5 minutes „Progent“ veikia kaip mikroorganizmus (bakterijas, pelėsius, virusus, amebas) naikinti dezinfekavimo priemonė.

#### PAKUOTĖ

„Progent“ tiekiamas dėžutėmis, kuriose yra po 5 „Progent“ A ir B tirpalo porų pakuotes su vienu „Progent Vial“ buteliuku ir pradžios rinkiniu.

#### SUDĖTIS

A tirpalas: 20,3 mg NaClO, iki 5 ml dozėje išgryninto vandens  
B tirpalas: 30,75 mg KBr, iki 5 ml dozėje išgryninto vandens

 **Gamintojas:**  
**Menicon Pharma**  
Bd Sébastien Brant  
Parc d'Innovation – F-67400 Illkirch Graffenstaden

**Platintojai:**  
Menicon SAS – 104 rue Martre – F-92583 Clichy Cedex



0483

STERILE A